

## Die Vorteile von Walser® Zahn-Matrizen

Handgearbeitet  
in Deutschland  
seit 1948



### Schnell und einfach angelegt und entfernt

Ein Griff. Klick. Sitzt: Im Gegensatz zu herkömmlichen Matrizen und Teilmatrizen legen oder entfernen Sie eine Walser Matrize mit einer einzigen Handbewegung. In Sekunden! Das störende Herumhantieren im Mund Ihres Patienten hat ein Ende. Schauen Sie selbst. Unsere Clips unter [www.walser-dental.com](http://www.walser-dental.com) zeigen Ihnen, wie schnell und einfach Sie eine Walser Matrize auch über Kofferdam einsetzen. Bei völliger Passung und in der Regel ohne Keilen! Auch für Komposite besonders geeignet.

### Kosteneinsparung von bis zu 8.000 €/Jahr (im Vgl. zu Schraubsystemen und anderen Teilmatrizen)

Zeit ist Geld. Auch in Ihrer Praxis. Das „Ein Griff. Klick. Sitzt.“ - Prinzip der Walser Matrize rechnet sich. Nicht bei einer Füllung am Tag – aber bei den rund 15 Füllungen, die in einer Zahnarztpraxis durchschnittlich gesetzt werden, schlägt das in Summe zu Buche. Wie unser Kostenrechner zeigt, können Sie in Ihrer Praxis gegenüber der Verwendung von Teilmatrizen über 8.000 Euro, gegenüber dem Einsatz von Schraubsystemen rund 4.000 Euro im Jahr sparen. Und das, obwohl eine Walser Matrize in der Anschaffung zunächst teurer wirkt als die anderen Systeme. Rechnen Sie selbst!

Zusatzvorteil: Walser Matrizen sind einfach zu sterilisieren und können mehrfach benutzt werden – ein Zahnarzt kann mit einem Sortiment rund zwei Jahre arbeiten bis die Matrizen verbraucht sind. Da sagt auch die Umwelt Danke!

### Selten Keile erforderlich

Aufgrund der perfekten Passform der Walser Zahn-Matrizen müssen Sie nur noch selten keilen. Und sollte dies doch einmal der Fall sein, ist das kein Problem. Denn der Keilhalter ist bereits in der O-Form Matrize eingebaut und verhindert zusätzlich, dass der Keil nach okklusal wegrutscht. Beim Abnehmen der Matrize werden die Keile mit einer Handbewegung automatisch mit der Matrize entfernt.

### Kein Schrauben, kein Spannen

Schrauben und Spannen adé. Walser Matrizen sind selbstspannend, d.h. sie spannen sich automatisch ganz von alleine um den Zahn. Die ausgereifte Technik sorgt dafür, dass die Matrizen nie ihre gleichbleibende Federkraft verlieren.

### Keine Probleme mit engen Zahnzwischenräumen

Da die Walser Matrize stramm gespannt eingesetzt wird, bleibt das Matrizenband stabil und verformt sich nicht. Dadurch gleitet die Walser Matrize leicht durch den Approximalkontakt. Ein Auseinanderhalten von Zähnen ist nicht erforderlich.

### Passen sich der Zahnform automatisch an

Während herkömmliche Matrizen von Ihnen manuell mit Keilen an die konische Zahnform angepasst werden müssen, damit sie zervikal überhaupt anliegen, spannt sich die Walser Matrize ganz von selbst perfekt um den Zahn. Keilen ist in der Regel überflüssig.

### Selten Papillenblutungen

Beim Einsetzen von Walser Matrizen kommt es selten zu Papillenblutungen, da sie am Zahn entlang gleiten, im Gegensatz zu anderen Systemen. Zusätzlich dichtet die Zahn-Matrize sofort den Kavitätenboden ab und schützt so gegen evtl. aufsteigendes Blut.



**Zehntausende Zahnärzte in über 120 Ländern weltweit arbeiten mit WALSER® Matrizen und täglich werden es mehr...**

## Gleichzeitig idealer Watterollenhalter

Walser Matrizen sind Matrizen und Watterollenhalter in einem, denn unter dem Bügel der Matrize hält die Watterolle ganz von alleine. Ein separater Halter entfällt.

## Patient kann Mund schließen und zubeißen

Ihre Patienten werden es Ihnen danken. Denn trotz einer Walser Matrize im Mund, können sie zubeißen und den Mund schließen.

## Ideal für Kinder – X-Form für zwei Füllungen gleichzeitig

Bei der Behandlung von zweiflächigen Füllungen und vorhandenem Interdentalraum bringt die X-Form-Matrize eine echte Erleichterung - besonders auch bei Kindern. Denn gewöhnlich kann aufgrund deren Ungeduld nur eine Füllung gelegt werden. Da freuen sich nicht nur die Kinder!

## Auch bei kleinen Mundöffnungen

Da Walser Matrizen eine grazil Form haben, sind sie auch bei kleinen Mundöffnungen ideal einzusetzen.

## Spezialmatrize für einseitig tiefe Karies

Für einseitig tiefe Karies gibt es die Spezialmatrizen Nr. 6c und 10c. Diese ersparen das umständliche Verlängern der Bänder durch Zuschneiden, das in solchen Fällen normalerweise erforderlich ist. Ein Griff. Klick. Sitzt. Mit der Nr. 6c und 10c können Sie einseitig tiefe Karies ohne Zusatzaufwand sofort behandeln.

## Endständige Zähne füllen – Spezialmatrize zervikal um den Zahn gespannt

Herkömmliche Matrizensysteme bieten keine überzeugende Lösung für endständige Zähne und extra große Molaren, da endständige Zähne nicht gekeilt werden können. Anders Walser: Die Nr. 23/24 ist ideal für solche Fälle. Sie liegt disto-zervikal automatisch an, ist mit einer Handbewegung in Sekunden bequem gesetzt, verhindert Überstopfung und erspart Ihnen das Wegschleifen von Überschuss. Eine echte Erleichterung!

## Die Nr. 24 hält auch über der Kofferdamklammer

Während andere Matrizensysteme beim Einsetzen über der Kofferdamklammer Schwierigkeiten bereiten, haben Sie mit der Walser Matrize Nr. 24 die perfekte Lösung. Sie hält auch über der Kofferdamklammer.

## Lösungen für Frontzähne

Auch für die Füllungen im Frontzahnbereich hat Walser passende Matrizen. Ein Griff. Klick. Sitzt. Füllen. Fertig! (siehe Clip XF-Matrize auf [www.walser-dental.com](http://www.walser-dental.com)).

## Präzision und zufriedene Kunden – made in Germany

Seit Bestehen der Dr. Walser Dental wurden zahlreiche Patente angemeldet. So haben wir unter anderem aus der Praxis für die Praxis das ausgeklügelte System der Walser®-Matrizen mit Zange entwickelt. Praktische und wissenschaftliche Erfahrungen wurden durch die Entwicklung vielfältiger Passformen in das heute perfekte System eingebracht. Walser Matrizen werden seit 1948 in Deutschland in Handarbeit hergestellt und wurden ständig verbessert. Die herausragende Qualität der Produkte wird auch dadurch belegt, dass die Reklamationsquote praktisch bei Null liegt. Nicht umsonst arbeiten täglich Zehntausende Zahnärzte weltweit in mehr als 120 Ländern mit Walser Matrizen und täglich werden es mehr...



**Zehntausende Zahnärzte in über 120 Ländern weltweit arbeiten mit WALSER® Matrizen und täglich werden es mehr...**